



GUÍA DE INICIO RÁPIDO: USO DE BACK BELT

1. Prepare el dispositivo y conecte el cinturón



Inserte 2 pilas alcalinas AAA en la parte posterior del dispositivo.



Enchufe bien el cable en la parte superior del dispositivo.



Asegúrese de que los 2 cables estén encajados en el cinturón.

AVISOS IMPORTANTES:

- Úselo entre 30 y 40 minutos, de 3 a 4 veces al día (o más).
- Con una mayor cantidad de usos y más prolongados, puede obtener mejores resultados.
- Puede usar Back Belt de pie, sentado o acostado.

2. Rocíe gel en los parches y bombee el cinturón

NOTA: Para el uso más prolongado, o si siente una picazón molesta, vuelva a rociar gel cada 30 minutos.



Aplique un mínimo de 7 rociadas de gel conductor DR-HO'S en toda la superficie de los electrodos inteligentes, incluso en los bordes, antes de usarlos.



Ajuste el cinturón alrededor de la cintura con los electrodos inteligentes en la parte lumbar de la espalda sobre la piel.



Bombee para inflar el cojín de apoyo de modo que los electrodos inteligentes hagan contacto firme con la piel.

3. Comience el uso.



Gire el disco de intensidad hasta que haga clic para encender el dispositivo. Aumente lentamente la intensidad hasta que los músculos se contraigan y se relajen. Recuéstese y relájese.



Para cambiar el modo o la duración, presione el botón correspondiente. Para continuar el uso después de que se termine el tiempo programado, primero, apague el dispositivo, y luego, vuelva a encenderlo.



Sujete el dispositivo al cinturón cuando esté en uso. ¡Disfrútele!

Cinturón con acción triple para la espalda



GUÍA DE INICIO RÁPIDO: USO DEL CINTURÓN PARA SOPORTE



1. Ajuste el cinturón alrededor de la cintura con los electrodos inteligentes en la parte lumbar de la espalda sobre la piel.



2. Para soporte adicional del torso o al levantar peso, ajuste la banda de soporte doble del cinturón.



3. Para soporte lumbar adicional, bombee e infle el cojín de apoyo inflable.



PARA AUMENTAR EL TAMAÑO DEL CINTURÓN
Si necesita aumentar la longitud del cinturón, conecte el extensor tal como se muestra.

Disco de intensidad

Aumente o disminuya la intensidad girando el disco.

Enchufes de los electrodos


Se conectan al Cinturón con acción triple para la espalda o a los parches para el cuerpo.

Botón de modo

Presiónelo para seleccionar entre el modo A, B o C. El modo seleccionado parpadeará cuando se escoja.

Botón de intervalo

Presiónelo para seleccionar el apagado automático después de 10, 20 o 40 minutos.

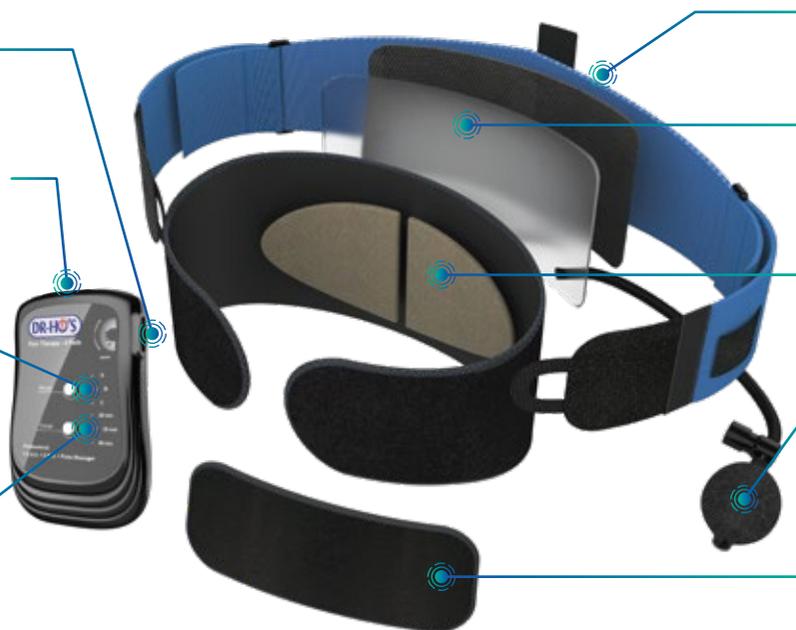

Banda de soporte dual

Ajuste para soporte adicional del torso.

Cojín de apoyo inflable:

Infle con bomba para soporte lumbar adicional.

Electrodos inteligentes

Aplique un mínimo de 7 rociadas de gel conductor en toda la superficie de los electrodos antes de usarlos.

Bomba

Bombee para inflar el cojín. Para desinflar, mantenga presionado el botón.

Extensor

Añádalo al cinturón principal (negro) para aumentar el tamaño.

Descargo de responsabilidad: Este producto DR-HO'S no está diseñado para diagnosticar, tratar ni curar ninguna enfermedad. Si usted tiene dolor o problemas de salud, debe consultar a su médico para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados.

Precauciones: NO use productos DR-HO'S ni ningún otro estimulador electrónico si tiene un marcapasos cardíaco o si está cursando un embarazo, debido a cuestiones de seguridad desconocidas. Si tiene preguntas o preocupaciones, consulte a su médico antes de usar el producto.

Fabricado por: Guangzhou Xinbo Electronic Co., Ltd. No. 23 Building, The Second Phase, Huachuang Animation Industry Park, Panyu, Guangzhou, Guangdong Province, 511450, República Popular China

Modelo: #PTS-IIIB+ Triple Action Back Belt



www.a3d.cl

Rut: 96.955.880-7

Distribuido por: A3D Chile S.A
Avda. Eduardo Frei Montalva 6001, Edif 46
Centro Empresarial El Cortijo, Conchalí, Santiago

Contacto:
Teléfono: 22 327 1630
Email: a3d@a3d.cl

[f](https://www.facebook.com/a3d.cl) A3D Chile [@a3d.cl](https://www.instagram.com/a3d.cl) [y](https://www.youtube.com/channel/UC...) A3D Chile [in](https://www.linkedin.com/company/a3d-cl) @a3d.cl [wa](https://www.whatsapp.com/channel/00299...) Fabricado en China